

For your approval

To _____ From _____ Date _____ Pages incl. this _____

Title _____ Language _____ **Proof no.** _____

Code no. _____ Version _____ Project id. _____ **Return before** _____

Sent for	Responsible	Done (date/signature)
Translation		
Proofreading layout / illustration		
Proofreading text / spelling		
Proofreading technical information		
Proofreading audiological information		
Quality Control Approval		

Remarks:

<input type="checkbox"/> New proof wanted	Further comments:
<input type="checkbox"/> OK for print	
Quantity:	
Requested date of delivery:	
Date:	
Signature:	

Please complete this form and return with the material attached

Oticon ♦ Epoq Streamer




906 73 962 00 / 05.08




Ghid pentru inceput

Descriere

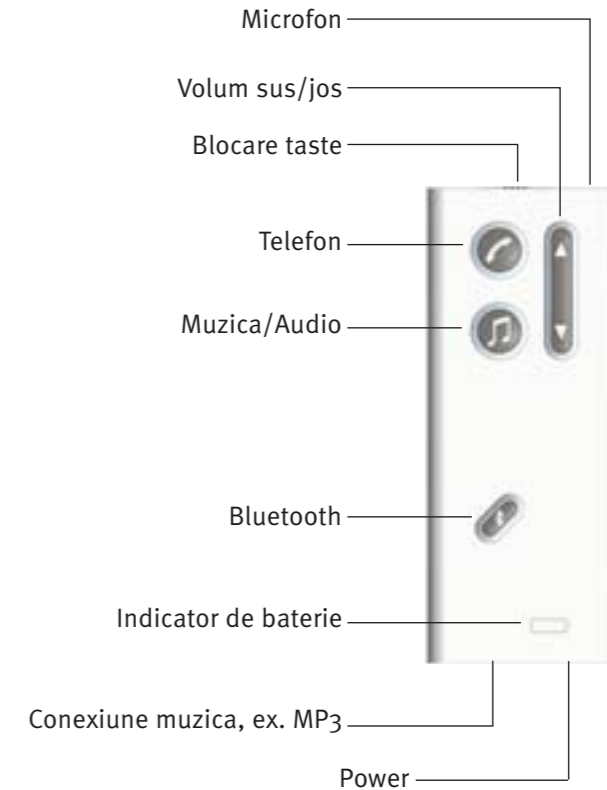

Oticon Epoq Streamer Overview

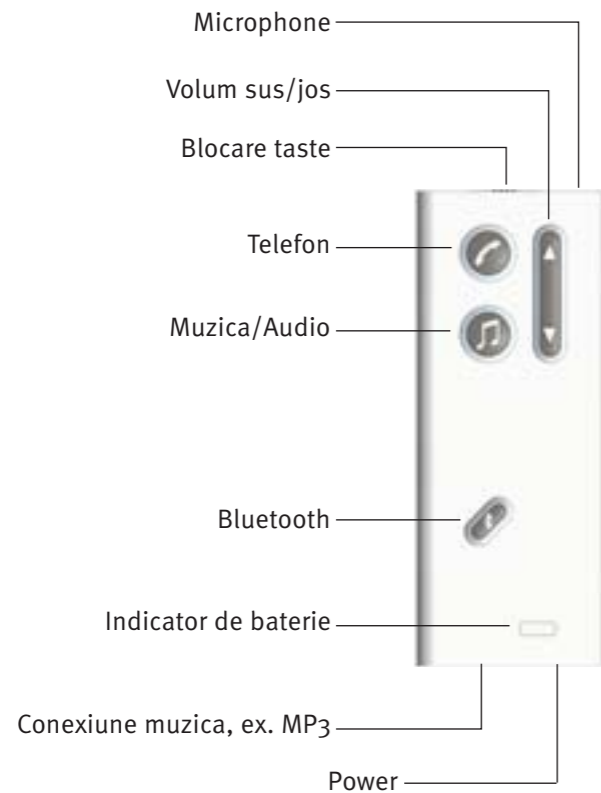

Continut

Introducere	3
Purtand Streamer-ul	4
Cum sa incepeti	6
Cum sa folositi cu un telefon mobil	7
Cum sa ascultati muzica/raudio	8
Informatii importante:	9
<i>Bateria</i>	9
<i>Blocarea tastelor</i>	9
<i>Buton pentru pornire/oprire</i>	10

My paired Bluetooth devices

Introducere

Streamer-ul va conecta protezele auditive in mod wireless la diferitele surse audio si le transforma in casti wireless.

Streamer-ul transmite sunetul la ambele proteze auditive, astfel imbunatatind experienta auditiva.

Combinand streamer-ul cu protezele auditive, acestea va ofera urmatoarele posibilitati:

- Conversatie hands-free pe telefonul mobil.
- Ascultarea muzicii si a diferitelor sunete din radio, calculator, MP3, conectate printr-un fir de Streamer.
- Ascultarea muzicii din alte surse in mod wireless prin bluetooth.
- Volum control prin telecomanda pentru protezele auditive


Purtand streamer-ul

Pentru a obtine performanta maxima a streamer-ului, folositi-l in mod hands-free cu ajutorul snurului pentru gat.

Vedeti ilustratiile de mai jos pentru folosirea si purtarea streamer-ului.

Hands free

Snur pentru gat

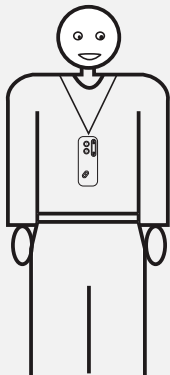


Scopul: telefon mobil, muzica, calculator, stand-by, telecomanda, etc.

Stand-by is when the Streamer is not being actively used (idle state). In this situation the Streamer can be in your pocket and still allows you to receive phone calls.


In mana

In mana

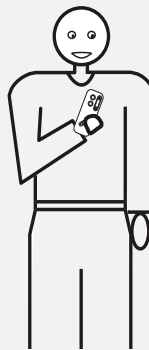

Scopul: telefonul mobil

In buzunar

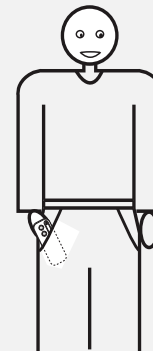



Scopul: telecomanda, stand-by

Cum sa incepeti

In pereche



Inainte ca streamer-ul sa fie folosit cu telefonul mobil si alte instrumente bluetooth, streamer-ul trebuie pregatit prin legarea lui la telefon, etc.

Setarea streamer-ului in mod de pereche	Functia bluetooth trebuie sa fie oprita. Apasati si tineti apasat butonul bluetooth pentru 7 secunde pana cand apare o lumina albastra. <i>Dupa 2 secunde lumina albastra porneste, dupa 7 secunde va licarii intermitent, ceea ce indica modul de pereche.</i>	
Pornirea functiei bluetooth	Functia bluetooth trebuie sa fie activa pentru a asigura conexiunea wireless intre streamer si sursele audio. Apasati butonul bluetooth pentru 2 secunde pana cand lumina labastra porneste. Dupa 10 secunde lumina albastra va incepe sa pulseze pentru a economisi energie.	



Vezi manualul de utilizare pentru streamer pentru detalii.

Pentru mai multe informatii privind conectarea telefonului mobil la streamer, vezi pagina de web www.oticon.com

Cum sa folositi streamerul cu telefonul mobil

Raspunzand la telefon	Cand suna telefonul mobil, veti vedea un semnal verde langa butonul de telefon. Vetii auzi de asemenea un ton in proteza auditiva. Apasati butonul de telefon pentru a raspunde. Inelul din jurul butonului de telefon este verde solid. <i>Functia bluetooth trebuie sa fie activa. Vezi sectiunea "Pornirea functiei bluetooth"</i>	
Terminarea apelului telefonic	Cand doriti sa terminati convorbirea de telefon, apasati butonul de telefon. Lumina verde se opreste iar apelul se termina.	
Initiati o convorbire	Folositi telefonul mobil pentru a suna pe cineva. Cand apelul trece prin streamer, nu apasati butonul de telefon pe streamer.	
Pornirea si oprirea microfoanelor din proteza auditiva	Apasati butonul Muzica/audio pentru 2 secunde pentru a reduce zgomotul din fundal.	

Cum sa ascultati muzica/audio



Ascultarea muzicii	Conectati cablul sursei audio la conexiunea de muzica al streamer-ului. Apasati butonul Muzica/Audio. Lumina galbena din jurul butonului se aprinde si muzica porneste.	
Oprirea muzicii	Apasati butonul Muzica/Audio. Lumina galbena din jurul se stinge.	
Pornirea si oprirea microfoanelor din proteza auditiva	Apasati butonul Muzica/audio pentru 2 secunde.	
Ajustarea volumului	Folositi butonul Sus/jos. Apasati Sus sau Jos pana cand volumul din proteza auditiva este confortabila. Volumul poate fi ajustat chiar daca fluxul audio nu este activ.	

Informatii importante

Baterii

Streamer-ul are o baterie reincarcabila incorporata. Bateria tine 5 ore avand functia audio activa.

Cand bluetooth este pornita (stand-by) bateria va tine 70 ore.

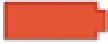Indicatorul de baterie va avea culoarea verde atunci cand bateria este slaba (inainte cu 20 minute). Indicatorul de baterie va palpai atunci cand bateria este pe terminate (inainte cu aprox. 5 minute).	
Incarcarea bateriei dureaza 4 ore. pe timpul lincararii bateriei, indicator palpaie verde. Cand bateria este incarcata complet, indicatorul va avea culoarea verde.	

Bateria trebuie incarcata frecvent.

Blocarea tastelor

Puteti bloca tastele pentru a evita apasarea lor neintentionat. Butonul de pe Streamer blocheaza si deblocheaza tastele.

Butonul de Pornire/Oprire

Streamer-ul nu are un buton de pornire/oprire deoarece foloseste putina energie. Daca planuiti sa nu folositi streamer-ul pentru o perioada mai indelungata, opriti conexiunea bluetooth.

Butonul de pe streamer este butonul de blocare a tastelor, nu buton de pornire/oprire.