

Instrucțiuni de utilizare Baterii pentru proteze auditive

Tip 10, 13, 312, 675

Activare și utilizare:

1. Îndepărtați folia de plastic de pe baterie.
2. Înainte de utilizare lăsați bateria la aer timp de aprox. 5 minute, pentru a se activa.

Bateriile pot fi confundate cu medicamentele (tablete). **Atenție!**
Nu puneți bateriile în gură sub nici un motiv; sunt alunecoase și pot fi ușor înghițite.
Dacă înghițiți accidental bateria, adresați-vă imediat medicului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Termenul de valabilitate este tipărit pe ambalaj.

Nu aruncați bateriile folosite la gunoi; le puteți duce înapoi la cabinetele noastre, pentru colectare, în vederea reciclării.

Nu aruncați bateriile în foc și nu încercați să le reîncărcați.